


# Kimberly-Clark\*

## Σετ φαρμακευτικής αγωγής MIC-KEY\* με σύνδεσμο Secur-Lok\*

ΣΕΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ MIC-KEY\* ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ SECUR-LOK\* ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Υ", 2 ΘΥΡΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY\* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC\*.
2. Στερεώστε το σετ φαρμακευτικής αγωγής στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας τη μαύρη γραμμή του σετ με τη μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY\*. Ασφαλίστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
3. Εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και τον σωλήνα MIC-KEY\* με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού. Πριν από τη χορήγηση φαρμάκων, βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
4. Μετά από τη χορήγηση φαρμάκων, εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και το σωλήνα MIC-KEY\* με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού.
5. Για να αποσυνδέσετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής από το σωλήνα MIC-KEY\* περιστρέψτε το σετ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μαύρη γραμμή στο σετ φαρμακευτικής αγωγής ευθυγραμμιστεί με τη μαύρη γραμμή στον σωλήνα MIC-KEY\*. Αφαιρέστε προσεκτικά το σετ φαρμακευτικής αγωγής από τον σωλήνα MIC-KEY\*. Επαναποθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY\*.
6. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε το σχολαστικά.

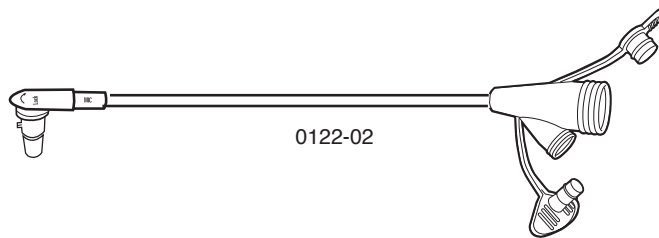

Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.**



Μη αποστειρωμένο

Ποσότητα

LOT

Αριθμός παρτίδας

REF

Αριθμός νέας παραγγελίας



Μίας χρήσης



Διαβάστε τις οδηγίες

Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)



Ημερομηνία λήξης



Δεν περιέχει DEHP (Δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλάτη)

CE 0344

\* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της. © 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium  
<http://www.kchealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591  
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800