

Kimberly-Clark*

Σετ προέκτασης με σπείρωμα MIC-KEY*, με σύνδεσμο Secur-Lok*

ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ MIC-KEY*, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ SECUR-LOK*, ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ MIC-KEY*

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC*.
2. Για την πραγματοποίηση γαστρικής αποσυμπίεσης ή εντερικής σίτισης, συνδέστε τον σύνδεσμο SECUR-LOK* του σετ προέκτασης, ευθυγραμμίζοντας τη μαύρη γραμμή του συνδέσμου με τη μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY*. Ασφαλίστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
3. Εκπλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK* και το σωλήνα MIC-KEY* με ζεστό νερό (10 ml για τους ενήλικες, 3-5 ml για τα παιδιά). Βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
4. Μετά τη σίτιση ή την αποσυμπίεση, εκπλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK* και το σωλήνα MIC-KEY* με 5-10 ml ζεστού νερού.
5. Για να αποσυνδέσετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK* από το σωλήνα MIC-KEY*, περιστρέψτε τον σύνδεσμο του σετ προέκτασης ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μαύρη γραμμή του MIC-KEY* ευθυγραμμιστεί με τη μαύρη γραμμή του σετ προέκτασης. Αφαιρέστε προσεκτικά το σύνδεσμο από τον σωλήνα MIC-KEY*. Επαναποθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY*.
6. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK* με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε σχολαστικά.



0126-12
0126-24

Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.



Μη αποστειρωμένο

Ποσότητα

LOT

Αριθμός παρτίδας

REF

Αριθμός νέας παραγγελίας



Μίας χρήσης



Διαβάστε τις οδηγίες

Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)



Ημερομηνία λήξης



Δεν περιέχει DEHP
(Δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλάτη)

CE 0344

* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της.
© 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.kchealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800