


Kimberly-Clark*

Ensemble de rallonge MIC-KEY* avec connecteur Secur-Lok*

ENSEMBLE DE RALLONGE MIC-KEY* AVEC CONNECTEUR À ANGLE DROIT SECUR-LOK* ET « Y » À 2 ORIFICES ET CLAMP

MODE D'EMPLOI

1. Retirer le bouchon de la sonde d'alimentation MIC-KEY* afin d'exposer la valve anti-reflux MIC*.
2. Raccorder l'ensemble de rallonge en alignant la ligne noire du connecteur sur la ligne noire du MIC-KEY*. Le verrouiller en place en le faisant pivoter de 3/4 de tour **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**.
3. Rincer l'ensemble de rallonge et le MIC-KEY* avec de l'eau tiède (10 ml pour les adultes, 3 à 5 ml pour les enfants). Vérifier que le rinçage s'effectue sans entrave.
4. Ouvrir l'orifice d'alimentation afin d'effectuer une décompression gastrique ou une alimentation entérale.
5. Après l'alimentation ou la décompression, rincer l'ensemble de rallonge et le MIC-KEY* avec 5 à 10 ml d'eau tiède.
6. Pour déconnecter l'ensemble de rallonge du MIC-KEY*, faire tourner le connecteur de l'ensemble **DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** jusqu'à ce que la ligne noire du MIC-KEY* soit alignée sur la ligne noire de l'ensemble de rallonge. Retirer délicatement le connecteur du MIC-KEY*. Replacer le bouchon sur le MIC-KEY*.
7. Après chaque utilisation, laver l'ensemble de rallonge avec de l'eau savonneuse tiède et rincer abondamment.

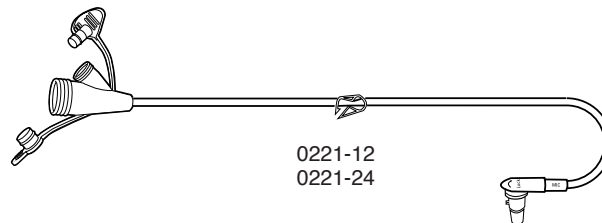

Destiné à un seul patient.

MISE EN GARDE : POUR ALIMENTATION ET/OU ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR VOIE ENTÉRALE UNIQUEMENT.

Contient du DEHP (voir www.kchealthcare.com/DEHP pour plus de détails)



Quantité

LOT

REF

Non stérile

N° de lot

Numéro de référence



À usage unique



Lire les instructions

Sur ordonnance uniquement (États-Unis)



Utiliser avant le



Date de fabrication

CE 0344

* Marque déposée ou marque commerciale de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales.
© 2003 KCWW. Tous droits réservés.

Fabriqué par Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 - États-Unis.
Distribué aux États-Unis par Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA 30076 - États-Unis
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgique
<http://www.kchealthcare.com> Aux États-Unis, appelez le 1-800-528-5591. Appel international : +1 801 572 6800.