

Kimberly-Clark*

Σετ προέκτασης MIC-KEY* με σύνδεσμο Secur-Lok*

ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ MIC-KEY* ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ SECUR-LOK*, ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Υ", 2 ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ







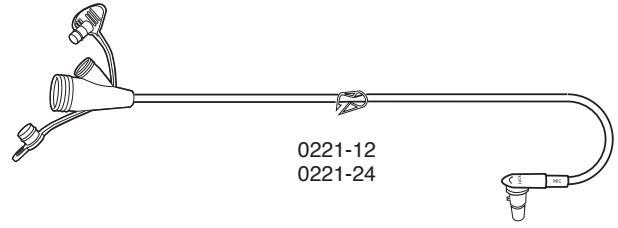

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC*.
2. Συνδέστε το σετ προέκτασης ευθυγραμμίζοντας τη μαύρη γραμμή του συνδέσμου με τη μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY*. Ασφαλίστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
3. Εκπλύνετε το σετ προέκτασης και τον σωλήνα MIC-KEY* με ζεστό νερό (10 ml για ενήλικες, 3-5 ml για παιδιά). Βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
4. Ανοίξτε τη θύρα σίτισης για να πραγματοποιήσετε γαστρική αποσυμπίεση ή εντερική σίτιση.
5. Μετά τη σίτιση ή την αποσυμπίεση, εκπλύνετε το σετ προέκτασης και τον σωλήνα MIC-KEY* με 5-10 ml ζεστού νερού.
6. Για να αποσυνδέσετε το σετ προέκτασης από τον σωλήνα MIC-KEY*, περιστρέψτε το σύνδεσμο του σετ προέκτασης ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY* ευθυγραμμιστεί με τη μαύρη γραμμή του σετ προέκτασης. Αφαιρέστε προσεκτικά το σύνδεσμο από τον σωλήνα MIC-KEY*. Επανατοποθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY*.
7. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ προέκτασης με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε το σχολαστικά.

Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Περιέχει DEHP (δείτε το www.kchealthcare.com/DEHP για λεπτομέρειες)



 Μη αποστειρωμένο	Ποσότητα	 Αριθμός παρτίδας	 Αριθμός νέας παραγγελίας
 Μίας χρήσης	 Διαβάστε τις οδηγίες	Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)	 Ημερομηνία λήξης
 Ημερομηνία κατασκευής	 0344		

* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της. © 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.kchealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800