


Kimberly-Clark*

Ensemble pour administration de médicaments MIC-KEY* avec connecteur Secur-Lok*

ENSEMBLE POUR ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS MIC-KEY* AVEC CONNECTEUR À ANGLE DROIT SECUR-LOK* ET « Y » À 2 ORIFICES

MODE D'EMPLOI

1. Retirer le bouchon de la sonde d'alimentation MIC-KEY* afin d'exposer la valve anti-reflux MIC*.
2. Emboîter l'ensemble pour administration de médicaments en alignant la ligne noire de l'ensemble pour administration de médicaments sur la ligne noire du MIC-KEY*. Le verrouiller en place en le faisant pivoter de 3/4 de tour **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**.
3. Rincer l'ensemble pour administration de médicaments et le MIC-KEY* avec 1 à 2 ml d'eau tiède. Vérifier que le rinçage s'effectue sans entrave avant l'administration des médicaments.
4. Après l'administration des médicaments, rincer l'ensemble et le MIC-KEY* avec 1 à 2 ml d'eau tiède.
5. Pour déconnecter l'ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY*, faire tourner l'ensemble **DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** jusqu'à ce que les lignes noires de l'ensemble et du MIC-KEY* soient alignées. Séparer avec précaution l'ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY*. Retirer délicatement l'ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY*. Retirer délicatement l'ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY*. Replacer le bouchon sur le MIC-KEY*.
6. Après chaque utilisation, laver l'ensemble pour administration de médicaments avec de l'eau savonneuse tiède et rincer abondamment.

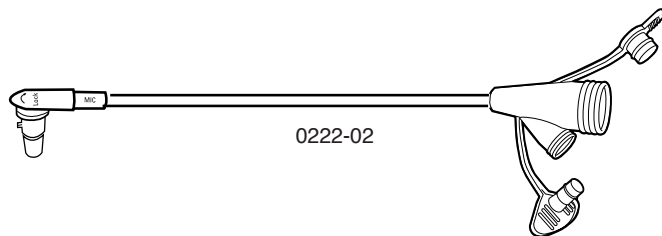

DESTINÉ À UN SEUL PATIENT.

MISE EN GARDE : POUR ALIMENTATION ET/OU ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR VOIE ENTÉRALE UNIQUEMENT.

Contient du DEHP (voir www.kchealthcare.com/DEHP pour plus de détails)



Non stérile

Quantité

LOT

N° de lot

REF

Numéro de référence



À usage unique



Lire les instructions

Sur ordonnance uniquement (États-Unis)



Utiliser avant le



Date de fabrication

CE 0344

* Marque déposée ou marque commerciale de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales.
© 2003 KCWW. Tous droits réservés.

Fabriqué par Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 - États-Unis.
Distribué aux États-Unis par Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA 30076 - États-Unis
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgique
<http://www.kchealthcare.com> Aux États-Unis, appelez le 1-800-528-5591. Appel international : +1 801 572 6800.