


Kimberly-Clark*

Σετ φαρμακευτικής αγωγής MIC-KEY* με σύνδεσμο Secur-Lok*

ΣΕΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ MIC-KEY* ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ SECUR-LOK* ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Υ", 2 ΘΥΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC*.
2. Στερεώστε το σετ φαρμακευτικής αγωγής στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας τη μαύρη γραμμή του σετ με τη μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY*. Ασφαλίστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
3. Εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και τον σωλήνα MIC-KEY* με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού. Πριν από τη χορήγηση φαρμάκων, βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
4. Μετά από τη χορήγηση φαρμάκων, εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και το σωλήνα MIC-KEY* με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού.
5. Για να αποσυνδέσετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής από το σωλήνα MIC-KEY* περιστρέψτε το σετ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μαύρη γραμμή στο σετ φαρμακευτικής αγωγής ευθυγραμμιστεί με τη μαύρη γραμμή στον σωλήνα MIC-KEY*. Αφαιρέστε προσεκτικά το σετ φαρμακευτικής αγωγής από τον σωλήνα MIC-KEY*. Επανατοποθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY*.
6. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε το σχολαστικά.

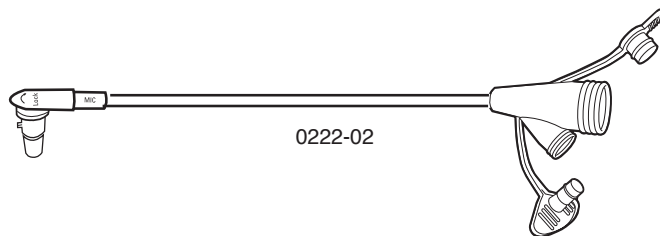

Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Περιέχει DEHP (δείτε το www.khealthcare.com/DEHP για λεπτομέρειες)



Ποσότητα

LOT

REF

Μη αποστειρωμένο

Αριθμός παρτίδας

Αριθμός νέας παραγγελίας



Μίας χρήσης



Διαβάστε τις οδηγίες

Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)



Ημερομηνία λήξης



Ημερομηνία κατασκευής

CE 0344

* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της. © 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.khealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800