

Kimberly-Clark*

Σετ προέκτασης βλωμού MIC-KEY* με σύνδεσμο Secur-Lok*

ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΛΩΜΟΥ MIC-KEY* ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ,
ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ SECUR-LOK* ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC*.
2. Εισαγάγετε το σύνδεσμο του σετ προέκτασης βλωμού στη θύρα σίτισης MIC-KEY*. Ευθυγραμμίστε τους μαύρους δείκτες του σετ προέκτασης βλωμού και του σωλήνα MIC-KEY*, και περιστρέψτε το σετ κατά μισή στροφή δεξιόστροφα, μέχρι να στερεωθεί στη θέση του.
3. Εκπλύνετε το σωλήνα με νερό (10 ml για ενήλικες, 3-5 ml για παιδιά) για να διασφαλίσετε ότι δεν έχει αποφραχθεί.
4. Χορηγήστε το διάλυμα σίτισης.
5. Μετά από τη σίτιση, εκπλύνετε το σετ προέκτασης βλωμού και το σωλήνα MIC-KEY* με 5 έως 10 ml ζεστού νερού.
6. Αποσυνδέστε το σετ προέκτασης βλωμού από το σωλήνα MIC-KEY* περιστρέφοντας ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ το σύνδεσμο του σετ σίτισης, μέχρις ότου σταματήσει. Αφαιρέστε προσεκτικά το σύνδεσμο από το σωλήνα MIC-KEY*. Πωματίστε το σωλήνα MIC-KEY*.
7. Πλύνετε το σετ προέκτασης βλωμού με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε σχολαστικά.








Χρήση σε έναν ασθενή μόνο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Περιέχει DEHP (δείτε το www.khealthcare.com/DEHP για λεπτομέρειες)



0223-12
0223-24

 Μη αποστειρωμένο	Ποσότητα	 Αριθμός παρτίδας	REF Αριθμός νέας παραγωγής
 Μίας χρήσης	 Διαβάστε τις οδηγίες	Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)	 Ημερομηνία λήξης
 Ημερομηνία κατασκευής	 0344		

* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της.
© 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.khealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800