

# Kimberly-Clark\*

## Ensemble de rallonge filetée MIC-KEY\* avec connecteur Secur-Lok\*

ENSEMBLE DE RALLONGE FILETÉE MIC-KEY\* AVEC CONNECTEUR À ANGLE DROIT SECUR-LOK\* POUR SONDES DE GASTROSTOMIE EXTRA-PLATES MIC-KEY\*

### MODE D'EMPLOI

1. Retirer le bouchon de la sonde d'alimentation MIC-KEY\* afin d'exposer la valve anti-reflux MIC\*.
2. Pour une décompression gastrique ou une alimentation entérale, raccorder le connecteur de l'ensemble de rallonge SECUR-LOK\* en alignant la ligne noire du connecteur sur la ligne noire du MIC-KEY\*. Le verrouiller en place en le faisant pivoter de 3/4 de tour **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**.
3. Rincer l'ensemble de rallonge SECUR-LOK\* et le MIC-KEY\* avec de l'eau tiède (10 ml pour les adultes, 3 à 5 ml pour les enfants). Vérifier que le rinçage s'effectue sans entrave.
4. Après l'alimentation ou la décompression, rincer l'ensemble de rallonge SECUR-LOK\* et le MIC-KEY\* avec 5 à 10 ml d'eau tiède.
5. Pour déconnecter l'ensemble de rallonge SECUR-LOK\* du MIC-KEY\*, faire tourner le connecteur de l'ensemble **DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** jusqu'à ce que la ligne noire du MIC-KEY\* soit alignée sur la ligne noire de l'ensemble de rallonge. Retirer délicatement le connecteur du MIC-KEY\*. Replacer le bouchon sur le MIC-KEY\*.
6. Après chaque utilisation, laver l'ensemble de rallonge SECUR-LOK\* avec de l'eau savonneuse tiède et rincer abondamment.

Destiné à un seul patient.

**MISE EN GARDE : POUR ALIMENTATION ET/OU ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR VOIE ENTÉRALE UNIQUEMENT.**

Contient du DEHP (voir [www.kchealthcare.com/DEHP](http://www.kchealthcare.com/DEHP) pour plus de détails)



0226-12  
0226-24



Quantité



N° de lot

REF

Numéro de référence



À usage unique



Lire les instructions

Sur ordonnance uniquement (États-Unis)



Utiliser avant le



Date de fabrication



\* Marque déposée ou marque commerciale de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales.  
© 2003 KCWW. Tous droits réservés.

Fabriqué par Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 - États-Unis.  
Distribué aux États-Unis par Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA 30076 - États-Unis  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgique  
<http://www.kchealthcare.com> Aux États-Unis, appelez le 1-800-528-5591. Appel international : +1 801 572 6800.