

# Kimberly-Clark\*

## Σετ προέκτασης με σπείρωμα MIC-KEY\*, με σύνδεσμο Secur-Lok\*

ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ MIC-KEY\*, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ SECUR-LOK\*, ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ MIC-KEY\*

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY\* για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC\*.
2. Για την πραγματοποίηση γαστρικής αποσυμπίεσης ή εντερικής σίτισης, συνδέστε τον σύνδεσμο SECUR-LOK\* του σετ προέκτασης, ευθυγραμμίζοντας τη μαύρη γραμμή του συνδέσμου με τη μαύρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY\*. Ασφαλίστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
3. Εκπλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK\* και το σωλήνα MIC-KEY\* με ζεστό νερό (10 ml για τους ενήλικες, 3-5 ml για τα παιδιά). Βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
4. Μετά τη σίτιση ή την αποσυμπίεση, εκπλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK\* και το σωλήνα MIC-KEY\* με 5-10 ml ζεστού νερού.
5. Για να αποσυνδέσετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK\* από το σωλήνα MIC-KEY\*, περιστρέψτε τον σύνδεσμο του σετ προέκτασης ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μαύρη γραμμή του MIC-KEY\* ευθυγραμμιστεί με τη μαύρη γραμμή του σετ προέκτασης. Αφαιρέστε προσεκτικά το σύνδεσμο από τον σωλήνα MIC-KEY\*. Επαναποθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY\*.
6. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ προέκτασης SECUR-LOK\* με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε σχολαστικά.



0226-12  
0226-24

Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.**

Περιέχει DEHP (δείτε το [www.khealthcare.com/DEHP](http://www.khealthcare.com/DEHP) για λεπτομέρειες)



Ποσότητα

LOT

REF

Αριθμός παρτίδας

Αριθμός νέας παραγγελίας



Μίας χρήσης



Διαβάστε τις οδηγίες

Για χρήση αποκλειστικά με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)



Ημερομηνία λήξης



Ημερομηνία κατασκευής

CE 0344

\* Σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της εταιρείας Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ή των θυγατρικών της.  
© 2003 KCWW. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται από την Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
Διανέμεται στις ΗΠΑ από την Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium  
<http://www.khealthcare.com> Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-528-5591  
Διεθνείς κλήσεις + 1 801 572 6800